


Uso pretendido

A Escova Para Limpeza de Válvula do Endoscópio é usada para a remoção das sujidades do canal das válvulas de sucção e de água ar do endoscópio. O produto é fornecido não estéril e destina-se exclusivamente a uso único.

Descrição do Produto

O produto é feito de uma peça plástica com uma escova em cada extremidade, sendo elas de tamanhos diferentes, para finalidades de uso diferentes:

Diâmetro	Comprimento	Local de Uso
10 mm	30 mm	Válvula de água e ar
5 mm	20 mm	Válvula de Sucção

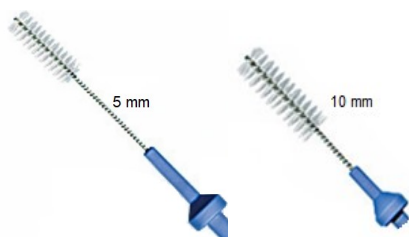

Orientações para antes do primeiro uso

Leia cuidadosamente e siga todas as instruções operacionais, de segurança e avisos antes do primeiro uso do dispositivo.

É necessário e essencial um conhecimento prévio relativo a manipulação e operação.



Retire o instrumento da embalagem cuidadosamente e examine o instrumento para verificar se existe alguma avaria. Se notar avarias ou falta de algum item, entre em contato com seu distribuidor imediatamente.

Manuseio e operação

A escova de limpeza deve ser segurada através da parte plástica. Cada escova tem que ser usada de acordo com sua finalidade (vide tabela na "Descrição do produto"). Além de remover a sujidade através da ação mecânica, ela serve para aplicar a solução descrita nas instruções de uso do fabricante do endoscópio.

Procedimento

1. Aplicar a solução de limpeza recomendada pelo fabricante do endoscópio na extremidade da escova a ser utilizada
2. Escovar toda a superfície do alojamento das válvulas de sucção e água/ar do endoscópio.

Armazenamento



Não coloque nenhum objeto pesado sobre o instrumento ou sua embalagem!

Não coloque os instrumentos perto de produtos químicos agressivos!



Não exponha os instrumentos à luz solar direta ou indireta, nem a outros raios ultravioletas!



Mantenha em local seco.

Não serão aceitas reclamações se os instrumentos tiverem sido armazenados de forma inadequada.

Limpeza e esterilização



Este dispositivo foi concebido e garantido para uso único!

Risco em caso de reutilização

A Escova Para Limpeza de Válvula do Endoscópio destina-se exclusivamente a uso único. A G-Flex isenta-se de toda e qualquer responsabilidade em caso de reutilização. A reutilização de um dispositivo de uso único pode representar riscos para a segurança do usuário, equipamento ou do paciente, devido a possível contaminação não controlada e/ou falta de confiabilidade no desempenho do dispositivo.

Usuário

Os usuários dos instrumentos G-FLEX precisam ser especialistas em suas áreas. É obrigatório um treinamento adequado e específico para preparação, cuidado e manutenção dos instrumentos flexíveis.

Reparos e reclamações

Para proteger a saúde dos funcionários G-Flex, somente serão aceitos instrumentos desinfetados ou esterilizados para análise ou reparos. A data e a validade da desinfecção ou esterilização devem estar sempre indicadas no lado externo da embalagem. Se esta exigência não for atendida, os instrumentos serão devolvidos ao remetente sem análise ou reparo.

Base legal

Aplicar-se-á a legislação Brasileira.

Suporte ao produto

Em caso de dúvidas ou dificuldades relativas aos nossos instrumentos, entre em contato com seu distribuidor local, ou diretamente com a G-FLEX em horário comercial.

Horários disponíveis: Segunda a sexta-feira, 8h00 às 17h48 (Brasília).



Número do catálogo



Consulte as instruções de uso



Lote



Data de fabricação



Usar antes de



Não usar se a embalagem se encontra danificada



Proibido o descarte em lixo comum



Não estéril



Não reutilize



Proteja da luz solar



Mantenha seco



Quantidade por caixa



Atenção



G-Flex América Latina Ind.Prod.Man.Ltda | Rua Marquês do Herval, 189 – Centro – Espírito Santo do Pinhal/SP
Telefone: +55 (0) 19. 3661-6831 | **E-mail:** production@g-flex.com | **Website:** www.g-flexamerica.com

Formulário Original: IFU-Escova para Limpeza de Válvula do Endoscópio
Nome Atual: IFU-Escova para Limpeza de Válvula do Endoscópio

Data de Aprovação: 22/11/19
Data de Revisão: 22/11/19

Data de Criação: 20/06/16
Página: 1 de 1
Versão: 01

Este documento é controlado somente em sua forma eletrônica pelo departamento da Qualidade. Cópias impressas estão sob a responsabilidade do usuário.