



# INSTRUÇÃO DE USO

## ESPUMA PARA LIMPEZA/PROTEÇÃO DO ENDOSCÓPIO

USO ÚNICO/ ISENTO DE REGISTRO

### Uso pretendido

A espuma pode ser utilizada para limpar o endoscópio ou para proteção da parte distal do mesmo.

A espuma para limpeza/proteção do endoscópio é usada para limpeza mecânica da superfície e componentes externos do aparelho endoscópio.

### Descrição do Produto

O produto constitui-se de um cilindro de espuma com uma abertura central, utilizada para encaixar o endoscópio e facilitar o manuseio da espuma ao longo deste. A espuma de limpeza é fornecida não estéril e destina-se exclusivamente a uso único.



### Orientações para antes do primeiro uso



Leia cuidadosamente e siga todas as instruções operacionais, de segurança e avisos antes do primeiro uso do produto.

É necessário e essencial um conhecimento prévio relativo a manipulação e operação.

Retire o produto da embalagem cuidadosamente e examine-o para verificar se existe alguma avaria. Se notar avarias ou falta de algum item, entre em contato com seu distribuidor imediatamente.

### Manuseio e operação

#### Quando utilizado para a limpeza:

No processo de limpeza do endoscópio, para a eficácia da limpeza, a espuma deve estar umedecida usando produtos indicados pelo fabricante do endoscópio.

#### Quando utilizado para a proteção:

Quando a espuma for utilizada para esta finalidade, ela deve estar seca ser utilizada somente para esta finalidade. Caso tenha sido usada para outros fins, descartar a mesma.

### Procedimento

Após o exame, encaixar a espuma na ponta distal do endoscópio de acordo com o tamanho do orifício da espuma, protegendo a mesma no trânsito até a sala de expurgo. Em seguida, usando produtos indicados pelo fabricante do endoscópio, friccionar a espuma na parte externa do equipamento de forma a realizar a remoção mecânica da sujeira. Repetir o processo de fricção até estar seguro de que toda a sujidade foi removida.

**Atenção:** Não utilizar a espuma de limpeza/proteção do endoscópio para a limpeza interna ou dos canais do endoscópio, uma vez que tal procedimento deve ser realizado com dispositivo apropriado.

### Armazenamento



Não coloque nenhum objeto sobre o instrumento ou sua embalagem!

Não coloque os instrumentos perto de produtos químicos agressivos!



Não exponha os instrumentos à luz solar direta ou indireta, nem a outros raios ultravioletas!



Mantenha em local seco.

Não serão aceitas reclamações se os instrumentos tiverem sido armazenados de forma inadequada.

### Limpeza e esterilização



Este dispositivo foi concebido e garantido para uso único!

### Risco em caso de reutilização

Esses dispositivos destinam-se exclusivamente a uso único. A G-Flex isenta-se de toda e qualquer responsabilidade em caso de reutilização. A reutilização de um dispositivo de uso único pode representar riscos para a segurança do usuário, equipamento ou do paciente, devido a possível contaminação não controlada e/ou falta de confiabilidade no desempenho do dispositivo.

### Usuário

Os usuários dos instrumentos G-FLEX precisam ser especialistas em suas áreas. É obrigatório um treinamento adequado e específico para preparação, cuidado e manutenção dos instrumentos flexíveis.

### Reparos e reclamações

Para proteger a saúde de seus funcionários, somente serão aceitos instrumentos desinfetados ou esterilizados para análise ou reparos. A data e a validade da desinfecção ou esterilização devem estar sempre indicadas no lado externo da embalagem. Se esta exigência não for atendida, os instrumentos serão devolvidos ao remetente sem análise ou reparo.

### Base legal

Aplicar-se-á a legislação Brasileira.

### Suporte ao produto

Em caso de dúvidas ou dificuldades relativas aos nossos instrumentos, entre em contato com seu distribuidor local, ou diretamente com a G-FLEX em horário comercial.

**Horários disponíveis:** Segunda a sexta-feira, 8h00 às 17h48 (Brasília).



Número do catálogo



Consulte as instruções de uso



Lote



Data de fabricação



Usar antes de



Não usar se a embalagem estiver danificada



Proibido o descarte em lixo comum



Não estéril



Não reutilize



Proteja da luz solar



Mantenha seco



Quantidade por caixa



Atenção



G-Flex América Latina Ind.Prod.Man.Ltda | Rua Marquês do Herval, 189 – Centro – Espírito Santo do Pinhal/SP  
Telefone: +55 (0) 19. 3661-6831 | E-mail: production@g-flex.com | Website: www.g-flexamerica.com

Formulário Original: IFU-Espuma para Limpeza/ Proteção do Endoscópio  
Nome Atual: IFU- Espuma para Limpeza/ Proteção do Endoscópio

Data de Aprovação: 05/11/16  
Data de Revisão: 05/11/16

Data de Criação: 04/11/16  
Página: 1 de 1  
Versão: 01

Este documento é controlado somente em sua forma eletrônica pelo departamento da Qualidade. Cópias impressas estão sob a responsabilidade do usuário.