

Uso Único

Uso pretendido

O bocal é utilizado para proteger o tubo de inserção do endoscópio e os dilatadores esofágicos de serem mordidos pelo paciente.

Descrição do Produto

O produto é feito de uma peça de plástico, com perfil anatômico para ser colocado na boca e fixado com o uso de uma fita em torno do pescoço do paciente.

Orientações para antes do primeiro uso

Leia cuidadosamente e siga todas as instruções operacionais, de segurança e avisos antes do primeiro uso do produto.

É necessário e essencial um conhecimento prévio relativo a manipulação e operação.

Retire o produto da embalagem cuidadosamente e examine-o para verificar se existe alguma avaria. Se notar avarias ou falta de algum item, entre em contato com seu distribuidor imediatamente.

Manuseio e operação

Evite colocar os dedos entre o bloco de mordida e os dentes do paciente quando o bocal estiver na boca do paciente.

Procedimento

- Solte um lado da fita do bocal antes de colocá-lo na boca do paciente.
- Coloque o bocal na boca do paciente.
- Passe a correia em torno do pescoço do paciente e prenda-a novamente o bloco de mordida.

Armazenamento



Não coloque nenhum objeto sobre o produto ou sua embalagem!



Não coloque o produto perto de produtos químicos agressivos!



Não exponha os produtos à luz solar direta ou indireta, nem a outros raios ultravioletas!



Mantenha em local seco, em temperatura ambiente e livre de contaminações.

É recomendável que sejam realizadas inspeções a intervalos regulares para garantir o uso das mesmas antes do vencimento do prazo de validade.

Não serão aceitas reclamações se os instrumentos tiverem sido armazenados de forma inadequada.

Limpeza e esterilização



Este produto foi concebido e garantido para uso único!

Risco em caso de reutilização

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso único. A G-Flex isenta-se de toda e qualquer responsabilidade em caso de reutilização. A reutilização de um produto de uso único pode representar riscos para a segurança do usuário, equipamento ou do paciente, devido a

possível contaminação não controlada e/ou falta de confiabilidade no desempenho do produto.

Descarte

O descarte do produto deve ser feito em lixo hospitalar ou conforme legislação local. No caso de produto com prazo de validade vencido ou embalagem não-integra, o mesmo pode ser descartado conforme conveniência.

Usuário

Os usuários dos produtos G-FLEX precisam ser especialistas na área de endoscopia.

Reparos e reclamações

Para proteger a saúde dos funcionários G-Flex, somente serão aceitos produtos desinfetados ou esterilizados para análise ou reparos. A data e a validade da desinfecção ou esterilização devem estar sempre indicadas no lado externo da embalagem. Se esta exigência não for atendida, os produtos serão devolvidos ao remetente sem análise ou reparo.

Base legal

Aplicar-se-á a legislação Brasileira.

Suporte ao produto

Em caso de dúvidas ou dificuldades relativas aos nossos produtos, entre em contato com seu distribuidor local, ou diretamente com a G-FLEX em horário comercial.

Horários disponíveis: Segunda a sexta-feira, 8h00 às 17h48 (Brasília).



Número do catálogo



Consulte as instruções de uso



Lote



Data de fabricação



Data de validade



Não usar se a embalagem estiver danificada



Cuidado



Não reutilize



Proteja da luz solar



Mantenha seco



Quantidade por caixa



Contém látex de borracha natural

Imagem Ilustrativa



G-Flex América Latina Ind.Prod.Man.Ltda | Rua Marquês do Herval, 189 – Centro – Espírito Santo do Pinhal/SP

Telefone: +55 (0) 19. 3661-6831 | E-mail: production@g-flex.com | Website: www.g-flexamerica.com

Formulário Original:
Nome Atual:

IFU-Bocal
IFU-Bocal

Data de Aprovação: 11/06/20
Data de Revisão: 11/06/20

Data de Criação: 15/09/16
Página: 1 de 1

Versão: 03